

# Bedienungsanleitung

## Duschhocker Turin / Art.-Nr.: 368.00.20

### Zweckbestimmung

Der Duschhocker ist für die Anwendung im häuslichen und im stationären Bereich. Er dient bei physischer Funktionseinschränkung der Erhöhung der Selbstständigkeit bei der Duschbenutzung. Trotz optimalen Sitzkomforts ist der Hocker für längeres Sitzen nicht geeignet.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung des Hockers einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!

### Inbetriebnahme



#### Hockerbeine einstellen:

- Verstellclip (A) durch herausziehen demontieren.
  - Fußrohr (B) in die gewünschte Höhe durch herausziehen einstellen.
  - Verstellclip (A) wieder montieren.
- Sturzgefahr! Achten Sie darauf, dass alle vier Hockerbeine gleich hoch eingestellt sind.

### Pflege und Wartung

Alle Kunststoffteile können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gereinigt werden. Beachten Sie deren Produktinformation. Bei den Aluminiumrohren ist in den meisten Fällen ein feuchtes Abwischen und anschließendes Trockenreiben völlig ausreichend.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Standsicherheit des Produktes. Bei Beschädigungen das Produkt umgehend überprüfen lassen. Zur Instandsetzung des Produktes wenden Sie sich an einen Fachhändler.

Nur Original Ersatzteile verwenden.

Lassen Sie den Hocker mindestens einmal halbjährlich von einem Fachhändler überprüfen.

### Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Der Wiedereinsatz ist abhängig vom Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz ist bei dem Produkt eine Wartung durchzuführen und die Hinweise zu Sicherheit, Pflege und Wartung sind zu beachten und einzuhalten. Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen hier auf das Medizinproduktegesetz (MPG) u. die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

### Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Produktes beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **2 Jahre**.

Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.

### Gewährleistung

Auf die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine Garantie von **24 Monaten**.

Hier von sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

### Hinweis!

Die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren. Bei Beanstandungen/Rückfragen geben Sie bitte die Artikel-Nummer an.

### Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegeben maximale zulässige Körpergewicht!**
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Hocker auf Beschädigungen. Sollten Schäden erkennbar sein, nehmen Sie den Hocker nicht in Gebrauch.
- Vor Benutzung folgende Punkte unbedingt prüfen:
  - ✓ Sitzplatte auf festen Halt
  - ✓ Standfestigkeit des Hockers
  - ✓ Verstellclip für die Höhenverstellung
- Den Duschhocker nicht mit dem Benutzer tragen.
- Der Duschhocker nur im Innenbereich und auf ebenen Untergrund benutzen.

### Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfähige Produkte sind gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt vom regulären Hausmüll zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen.


### Hinweis!

Die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren. Bei Beanstandungen/Rückfragen geben Sie bitte die Art.Nr. bzw. Modell an.

### Technische Daten (Techn. Änderungen vorbehalten)

Art.-Nr.	Typ	Abmaße/cm C / D / F	G/kg	max. Körperlast
368.00.20	Turin	46-63,5 / 32/ 43,5x43,5	1,6	100 kg

C=Höhe, D=Fläche, F=Stellmaß

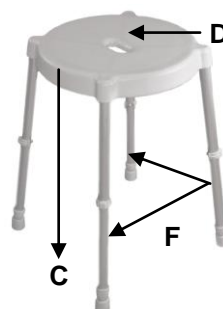

Duschhocker nur mit dieser Verschlusskappe verwenden!

