

GEBRAUCHSANWEISUNG

TOILETTENSTUHL – ELEKTRISCH: 11004020



Informationen vor der Verwendung/Wie das medizinische Produkt funktioniert

1. Lesen Sie die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
3. Das Produkt darf nur von Personal benutzt werden, das mit dessen Funktionsweise vertraut ist.
4. Wartungsarbeiten sowie Sicherheits- und technische Überprüfungen dürfen nur von einem autorisierten Serviceunternehmen oder einem anderen von Koval autorisierten Fachunternehmen durchgeführt werden.
5. Montage, Überarbeitungen oder Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Serviceunternehmen oder einem anderen von Koval autorisierten Fachunternehmen durchgeführt werden.
6. Falls technische Änderungen, einschließlich Upgrades oder Überarbeitungen der Produkte, nicht von Koval oder einem anderen von Koval autorisierten Fachunternehmen durchgeführt werden, erlischt jegliche Garantie für solche Überarbeitungen sowie für Produkte, an denen solche Überarbeitungen durchgeführt wurden.

Vorbeugende Maßnahmen

Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Befolgen Sie stets die Hinweise unter den »WARNUNG« Zeichen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektrische Toilettenstuhl ist ein mobiles Gerät, das für tägliche persönliche Hygienemaßnahmen wie Waschen, Duschen und Toilettengänge auf komfortable Weise konzipiert ist. Die Höhenverstellung und Kippfunktion erhöhen den Komfort des Patienten und verbessern die Arbeitsumgebung des Pflegepersonals. Die Ausrüstung ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

Vorschriften und Normen

Stellen Sie stets sicher, dass die geltenden Normen oder Vorschriften eingehalten werden.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf die Verordnung für Medizinprodukte MDR 2017/745.

Verantwortung und Garantie

Der Hersteller des Produkts ist für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts verantwortlich, vorausgesetzt:

A: Das Produkt wird ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet.

B: Die Funktionsprüfungen werden regelmäßig durchgeführt.

Transportschäden

Bitte überprüfen Sie bei der Lieferung das Produkt und seine Verpackung auf Schäden. Beachten Sie stets das Lieferdatum: Sichtbare Schäden sollten innerhalb von 2 Tagen nach der Lieferung gemeldet werden, versteckte Schäden innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung.

Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich auf dem Produktschild, das auf der Innenseite der Produktbasis angebracht ist.

Teilebezeichnung

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Toilettensitz mit Verschluss | 8 Verstellbare Fußstütze |
| 2 Rückenlehne | 9 Toiletteneimer |
| 3 Abnehmbarer Kopfstütze | 10 Gurt |
| 4 Armlehne | 11 Elektrischer Antrieb |
| 5 Manövriergriffe | 12 Batterie |
| 6 Doppelradrolle mit Bremse | 13 Steuerbox |
| 7 Doppelradrolle | 14 Handgerät |
| | 15 Halter für abnehmbares Kopfteil |
| | 16 Abnehmbare Beinstütze |



Spezifikationen:

Technische Daten

Produktcode:	11004020
Höhe:	1000 mm (ohne Kopfstütze)
Länge:	820 mm (ohne Kopf- und Fußstütze)
Breite:	670 mm
Sitzhöhe:	540-890 mm
Rückenlehnenneigung:	8° bis 16°
Höhenverstellbare Fußstütze:	40 mm
Gewicht:	39,5 kg
Sichere Arbeitslast:	150 kg
Schutzklasse:	IPX6

Erstnutzung

Stellen Sie den Stuhl am gewünschten Ort auf, entfernen Sie die Verpackung, arretieren Sie die Rollen und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Montieren Sie die verstellbare Kopfstütze und sichern Sie sie mit der Klemme. Der Toilettensstuhl ist einsatzbereit.

Produktbeschreibung

Der 420 mm breite Sitzbereich aus Polyurethanschaum ist wasserabweisend und für das Duschen geeignet. Elektrische Antriebe werden manuell bedient und die Positionen können auch bei voller Belastung des Stuhls geändert werden.

Der Toilettensstuhl ist mit Rollen Ø100 mm ausgestattet, um eine einfache Umpositionierung und den Transport des Patienten zu ermöglichen.

Die Höhenverstellung erfolgt durch einen Linearantrieb von 540 bis 890 mm, die Rückenlehne ist von 8° bis 16° verstellbar, und die Fußstützen sowie Armlehnen sind manuell einstellbar.

Die Einbaumaße des Stuhls betragen ca. (L, B, H) 820x670x1000 mm.

Produktnutzung:

Heben und Senken

Das Heben und Senken des Toilettenstuhls ist nur mit der Fernbedienung verstellbar. Um den Toilettenstuhl anzuheben, drücken und halten Sie die Aufwärtspfeiltaste auf der Fernbedienung und stellen die gewünschte Position ein.

Um den Toilettenstuhl zu senken, drücken und halten Sie die Abwärtspfeiltaste auf der Fernbedienung und stellen die gewünschte Position ein.

Ein Signalton ertönt, wenn die Batteriekapazität zu niedrig ist (noch 2–10 Zyklen).



Einstellung der Kopfstütze. Lösen Sie die Klemme und stellen Sie die gewünschte Höhe der abnehmbaren Kopfstütze ein. Sichern Sie sie durch Festziehen der Klemme. Änderungen: Die Kopfstütze befindet sich jetzt in einer ergonomischeren Position und der Halter ist abnehmbar. Dadurch kann die Kopfstütze separat bestellt werden.



Öffnen der Armlehne. Öffnen Sie die Armlehne, indem Sie sie manuell drehen und nach oben anheben.



Einstellung der Fußstütze. Die Fußstütze ist höhenverstellbar. Lösen Sie den grauen Stift und stellen Sie die gewünschte Höhe der Fußstütze ein. Sichern Sie sie mit dem grauen Stift. Verstauen Sie die Fußstütze, indem Sie sie nach oben drehen.

Änderungen: Neugestaltete Beinauflagen befinden sich in einer ergonomischeren Position und können separat bestellt werden.



WARNUNG

- Um das Risiko eines Sturzes von Patienten beim Platzieren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Bremsen vor der Nutzung des Geräts aktiviert sind. (Siehe Abb. 1)
- Um Patientenstürze oder Verletzungen der Pflegekräfte zu verhindern, sollten bei Bedarf gemäß dem Zustand des Patienten zwei Pflegekräfte anwesend sein.
- Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Patient niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Um Patientenstürze oder Verletzungen der Pflegekräfte zu verhindern, sollte der Patient bei Bedarf gemäß seinem Zustand während des Transfers/Duschens mit einem Sicherheitsgurt gesichert werden. (Siehe Abb. 2)
- Um ein Umkippen des Geräts zu verhindern, sollten Sie andere Geräte, wie ein Bett, einen Lift oder einen Beistelltisch, nicht in unmittelbarer Nähe heben oder senken und auf stationäre Gegenstände achten.
- Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, desinfizieren Sie regelmäßig nach jedem Gebrauch, falls erforderlich, oder mindestens täglich.
- Um Verletzungen von Patienten und Pflegekräften zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät niemals modifizieren oder inkompatible Teile verwenden.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte dieses Produkt ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.
- Um einen Betriebsausfall zu vermeiden, laden Sie die Batterie, wenn der akustische Warnalarm ertönt.
- Die Batterie kann nur direkt über den Toilettenstuhl geladen werden, wenn dieser nicht genutzt wird.
- Um Verletzungen zu vermeiden, darf die Batterie nur in einem trockenen, gut belüfteten Bereich geladen werden.



Abbildung 1



Abbildung 2

Wartung

Es wird empfohlen, das Produkt regelmäßig nach jedem Gebrauch, falls erforderlich, oder mindestens täglich zu reinigen und/oder zu desinfizieren. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und einem Desinfektionsreiniger. Desinfektionstücher, die mit einer 70% (v/v) Isopropylalkohollösung vorgetränkt sind, können ebenfalls verwendet werden. Abschließend sollte das Produkt mit warmem, sauberem Wasser abgewischt werden.

Sicherheits- und Technikchecks

Gemäß dem „Medizinproduktegesetz“ sollten Sicherheits- und Technikchecks einmal jährlich durchgeführt werden.

Reparaturen, Service und Ersatzteile

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Koval oder Ihren örtlichen Koval-Vertreter.